

巻いて寝るだけ。肩すっきりケアサポート。

CoriNight

就寝時専用


コリナイト

使用方法

- 就寝時、左右両足に巻いてください。
- このサポーターに貼り付けた「指圧器具」が、直接肌に当たるようにします。くつ下、布、テープ等の上からでは効果がありません。
- サポーターに貼り付けられた「指圧器具」の位置はとても重要です。説明図をみて位置を合わせて貼り付けてください。
- サポーターは伸縮性のある素材です。しっかり締めてください。しかし強く締めすぎると血行障害がおこりますので、「指圧器具」が肌に密着する程度の強さに加減してご使用ください。
- コリナイトは就寝時に装着します。コリナイトを装着したままの歩行は控えてください。

指圧器具の貼り付け位置

※図は右足用で説明しています。

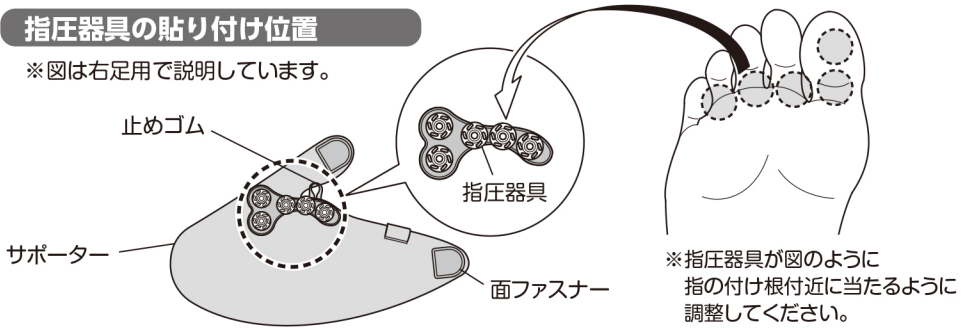

装着のしかた

- 1 サポーターを床に置き、指圧器具が指の付け根付近に当たるように足をのせる
 - 2 サポーター内側を足に巻き付ける
 - 3 サポーター外側を足に巻き付け、面ファスナーで固定する
 - 4 サポーター突出部を親指に巻き付け、面ファスナーで固定する
 - 5 止めゴムを中指に引っ掛ける
-

ご注意ください

- きゅうくつ過ぎるほど締め付けしないでください。
- サポーターを強く締めすぎると、長時間の圧迫による血行障害のおそれがあります。サポーターを緩めるか、外してください。
- 長時間の連続使用は、お肌がかぶれる場合があります。1日5～8時間を目安にご使用ください。
- 装着したまま歩かないでください。器具の破損や、足裏の負傷の原因となります。
- コリナイトを使用中に異常が発生したら、ただちに使用を中止して、医師に相談してください。 ※妊娠や、ペースメーカーなどの体内植込み型医療電気機器を使用している方は使用しないでください。

サポーター、指圧器具のお手入れ方法

- サポーターを洗濯する場合は、必ず器具を取り外してください。
- サポーターは手洗いのあと、洗濯ネットに入れて軽く脱水をかけてください。
- 時々、指圧器具の表面（皮膚に当たる面）をアルコールを含んだウエットティッシュ等で拭いてください。器具を清潔にお使いいただくためです。

※サポーターの形状・寸法、指圧器具の形状や個数は予告なく変更することがあります。

※製品には万全をきしておりますが、万一不良等お気づきのことがございましたら、当社までご連絡ください。

販売元 Taratine タラチネ / 製造販売元 株式会社ヘルスサイエンス

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1-17-11 ニックビル 2F

TEL.06-6534-7070 (平日 10:00～12:00/13:00～16:00)